

腹臥位クッション

-S・P・C-

アニマル U-2 ● Small-size
● Large-size


軽量コンパクトで
手軽に四つ這い姿勢がとれます。



DB BEAR

使い方色々、 腹臥位クッション。

アニマル U-2

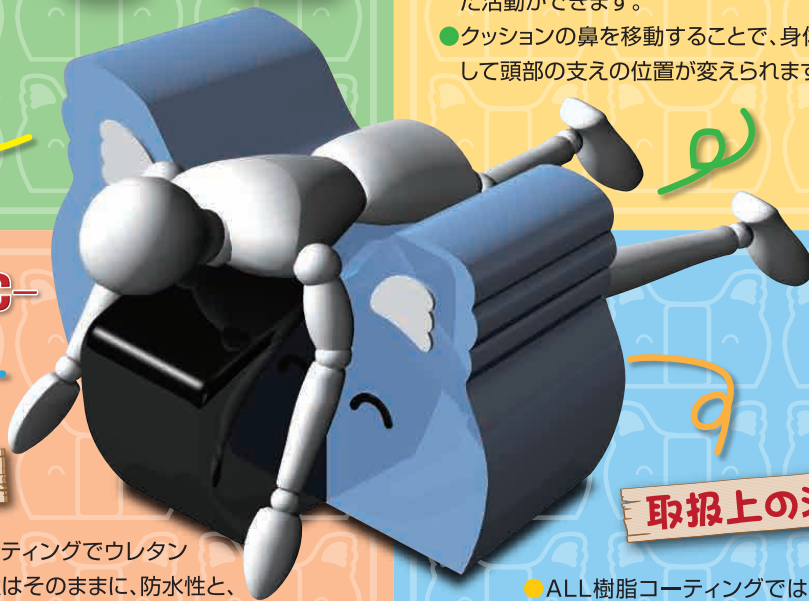

使用方法

- クッションの鼻部に顔を乗せるようにして、身体を乗せて下さい。
- 両サイドの耳のアールで身体を支えることで、安定して四つ這い位をとることができます。
- クッションの鼻を取り外す事で、頭部が下がり排痰がしやすくなります。又、頭部の伸展を促し、首のコントロールを訓練することができ、手と目の連動した活動ができます。
- クッションの鼻を移動することで、身体の変形に対して頭部の支えの位置が変えられます。

-S.P.C-


特徴

- ALL樹脂コーティングでウレタンのクッション性はそのままに、防水性と、耐久性がアップしました。
- 特殊塗料仕上げなので、オーダーカラーにも対応できます。
- クッションの鼻は別注オーダー可能で、気管切開などにも対応できます。

取扱上の注意

- ALL樹脂コーティングでは有りますが、浴槽内・プールでは使用しないで下さい
- 水洗い・アルコール消毒後は乾いた布で拭き乾燥させて下さい。
- タバコ・ライター・ストーブなどの火気には、近付けないで下さい。

■サイズ

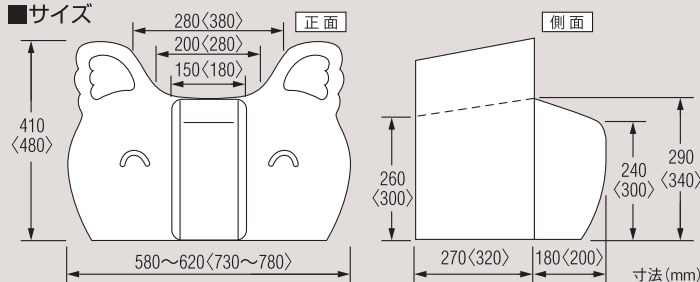

サイズ：スモールサイズ H410×(580~620)×450
 ラージサイズ H480×(730~780)×520

中材：ウレタンフォーム
 コーティング材：ウレタン樹脂(無溶剤型)
 着色：2液型ポリウレタン樹脂塗料
 適応年齢：6歳~15歳(10歳~18歳)

※〈〉はラージサイズです。

予告なく変更されることがあります。

DB BEAR www.shirae.co.jp/

株式会社 **シライ**

商品企画部 大阪府茨木市目垣2-25-18
 TEL : 072-630-2607 FAX : 072-630-2677 E-mail : shirae@shirae.co.jp

■取扱店

2012年5月1日